



URO Foley Catheter 사용설명서

【품목허가번호】수인 08-63호

【품목명】비뇨기과용 범용 튜브·카테터

【모델명】Packing상 기재

【제조번호】Packing상 기재

【제조일자】Packing상 기재

【사용목적】

본제품은 요도 및 피부를 통하여 방광에 유치(삽입)하여 뇨를 배출하거나 Irrigation(세척)을 하기 위하여 사용되어지는 1회용 제품이다.

【사용방법】

1. 사용 전 준비사항

- 1) 시술과정과 사용 목적을 환자에게 설명한다. 카테터 삽입시 환자에게 구강을 통해 깊이 숨을 들이 쉴 것을 지시한다. 이것은 긴장의 완화뿐 아니라 요도 괄약근을 이완시키기 위함이다.
- 2) 외음부를 세척한다. 감염을 최소화하기 위해 원칙적으로 (외음부는) 면도되어야한다.
- 3) 환자의 등을 바닥에 대고 다리를 벌린 자세로 위치시킨다.
- 4) 환자의 엉덩이 아래 보호물을 준비해 둔다.
- 5) 멸균된 클러브를 준비하고, 수술 부위를 멸균된 천으로 덮어준다.
- 6) 카테터를 부풀려서 풍선을 테스트해본다.

2. 남성 사용법

A) 멸균

음경을 한손으로 잡고 다른 손으로 살균력이 있는 거즈 등을 사용하여 요(尿)가 나오는 부분을 소독한다. 거즈, 면봉 등을 사용하여 소독할 때 한번 씩만 사용하고 버리도록 하고, 소독 시에 소독대상을 중심으로 안쪽에서 바깥쪽으로 원을 그리며 소독한다.

B) 카테터 삽입

- (1) 손으로 요관이 일직선이 될 수 있도록 음경을 바로 세운다. 1회용 주사기를 요관 끝에 위치시킨 후 윤활제를 추가 압력이 생기지 않도록 서서히 주입한다. 주입 후 윤활제가 다시 새는 것을 방지하기 위해 요관을 잠시 동안 손으로 압박한다.
- (2) 카테터를 멸균된 핀셋으로 잡고 카테터의 머리 부분(funnel end)을 소지와 약지사이에 끼워 고정시킨다.
- (3) 카테터의 꼬리 끝을 요도에 삽입하고 15cm가량 밀어 전진 시킨다. 카테터가 괄약근 근처에 도달하게 되면 약간의 저항감이 생기는데 그때는 음경의 위치를 약간 낮추고 살며시 카테터를 밀어 넣는다.

C) 배뇨

- (1) 방광에 카테터가 도달하게 되면, 요가 새어나온다. 이때 카테터 끝의 배뇨구멍은 방광의 지지조직에 위치하게 된다. 빠져나오는 요는 카테터에 연결된 배뇨 주머니를 통해 받도록 한다. 이후 카테터를 5cm 정도 방광에 더 밀어 넣은 후, 규정된 양만큼의 증류수로 풍선을 부풀린다. 조심해서 카테터를 잡아당겨 풍선이 방광의 목 부분에 걸리는지 확실히 확인한다.
- (2) 보통 10ml/cc 풍선은 방광에 지속적으로 유지시키는 카테터에 많이 사용하고, 30ml/cc 이상의 풍선은 지혈(haemostasis)할 때 많이 사용한다. 방광이 완전히 비었을 때는, 다른 한사람이 치골 윗부분의 하복부에 손바닥을 사용하여 가벼운 압박을 가해준다.
- (3) 카테터를 깨끗이하여 요 주머니에 부착 시킨다. 음경과 그 주위를 깨끗이 닦고 카테터가 빠지지 않게 테이핑을 하면 모든 과정이 종료된다.

3. 여성 사용법

사용방법은 남성 사용방법과 거의 동일하다.

A) 멸균

- (1) 배설물찌꺼기나 질 분비물로부터 요도의 오염을 방지하기 위해서 클리토리스로부터 질까지의 외음부를 세척한다.
- (2) 거즈나 면봉을 한 번씩만 사용하여 대음순, 소음순, 요도 중심의 하부를 세척한다. 한 손으로 세척과정의 완료될 때까지 다른 한 손으로는 음순을 벌려준다.

B) 카테터 삽입

- (1) 음순을 벌려준 채로 윤활제를 발라준 후 요도로 카테터를 삽입한다. 천천히 밀어 넣는다. 방광에 도달하면 바로 배뇨가 될 것이다. 멸균 증류수로 풍선을 확장시키기 전에 카테터를 5cm더 삽입한 후 카테터를 부드럽게 뒤로 빼내어 방광목에 위치시킨다.

【사용 시 주의사항】

- 1) Balloon 확장 시 멸균 증류수를 사용하고, 식염수를 사용하지 말 것.
- 2) 집게로 카테터의 Shaft를 누르지 말 것.

【멸균방법】 감마 멸균

【저장방법】 깨끗한 실온에서 보관한다.

【포장단위】 10ea/box

【사용기한】 5년

【제조자】URO Technology Sdn. Bhd.(말레이시아, Lot 2491, Batu 39 1/2, Pontian Besar 82000 Pontian, Johor, MALAYSIA)

【수입업자】(주)정안인터내셔널(서울특별시 금천구 가산디지털1로 70, 802호)

【부작용 보고 관련 문의처】의료기기안전정보원(080-080-4183)