



Bone Marrow Biopsy Needle

사용설명서

【품목인증번호】수인 10-368호

【품목명】골수생검 도구 한 벌

【모델명】Packing상 기재

【제조번호】Packing상 기재

【제조일자】Packing상 기재

【사용목적】

인체 조직을 생체 검사하려고 사용하는 침.

【사용방법】

1. 사용 전 준비사항

- (1) 포장을 벗긴 후, 기구의 손상이나 이물질이 없는지 확인한다.
- (2) 비멸균 제품 이므로 소독을 하고 수술실에 배치한다.

2. 사용방법

- (1) 생검 부위를 소독하고 피부절개를 시행한다.
- (2) Stylet과 Cannula를 일체형으로 결합시켜 Handle부위를 잡고 골면과 수직으로 찌러 넣는다.
- (3) 생검 목표 위치에 접근 후 Stylet을 제거하고 Introducer를 삽입한다.
- (4) 한 쪽 방향으로 Handle을 수회 돌린 후, Cannula와 함께 제거한다.
- (5) Remover로 생검 검체를 채취한 후 침을 뺀 자리는 압박 지혈한다.

3 사용 후 보관 및 관리방법 : **1회용** 사용한 제품은 폐기한다.

【사용 시 주의사항】

1. 사용시 주의사항

- (1) 포장상태 및 제품의 파손여부를 확인한다.
- (2) 기구는 적절한 훈련을 받은 전문가에 의해 사용되어야 한다.

2. 보관조건 혹은 저장방법

- (1) 깨끗하고 건조한 환경에서 보관한다.

【멸균방법】감마 멸균

【저장방법】깨끗하고 건조한 환경에서 보관한다.

【포장단위】제조원의 포장단위에 의함

【사용기한】제조일로부터 5년

【제조자】TSK Laboratory, Japan(일본, 1510-1, Soja-Machi, Tochigi-Shi, Tochigi-Ken 328-0002, JAPAN)

【수입업자】㈜정안인터내셔널(서울특별시 금천구 가산디지털1로 70, 802호)

【부작용 보고 관련 문의처】의료기기안전정보원(080-080-4183)